


Montagehandleiding

meegroeistoel Breezi en Breezi MAX

Inhoud standaard pakket:

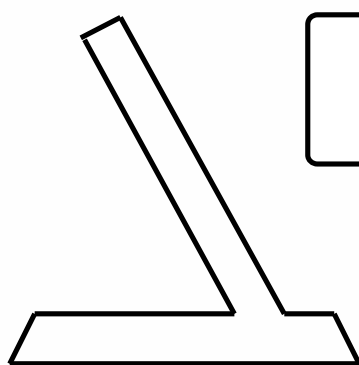


Breezi (Max) zijframe




zitting



voetplaat

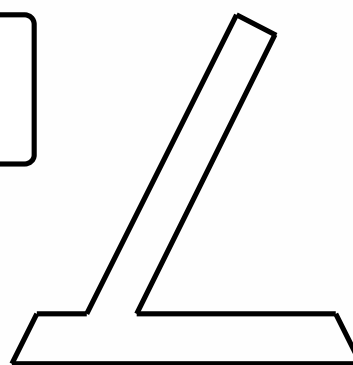


Breezi (Max) zijframe

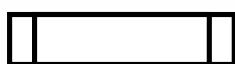


2x rugdeel




2x verbindingstang

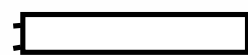

**1x verbindingbalk (Breezi)
2x verbindingbalk (Breezi Max)**

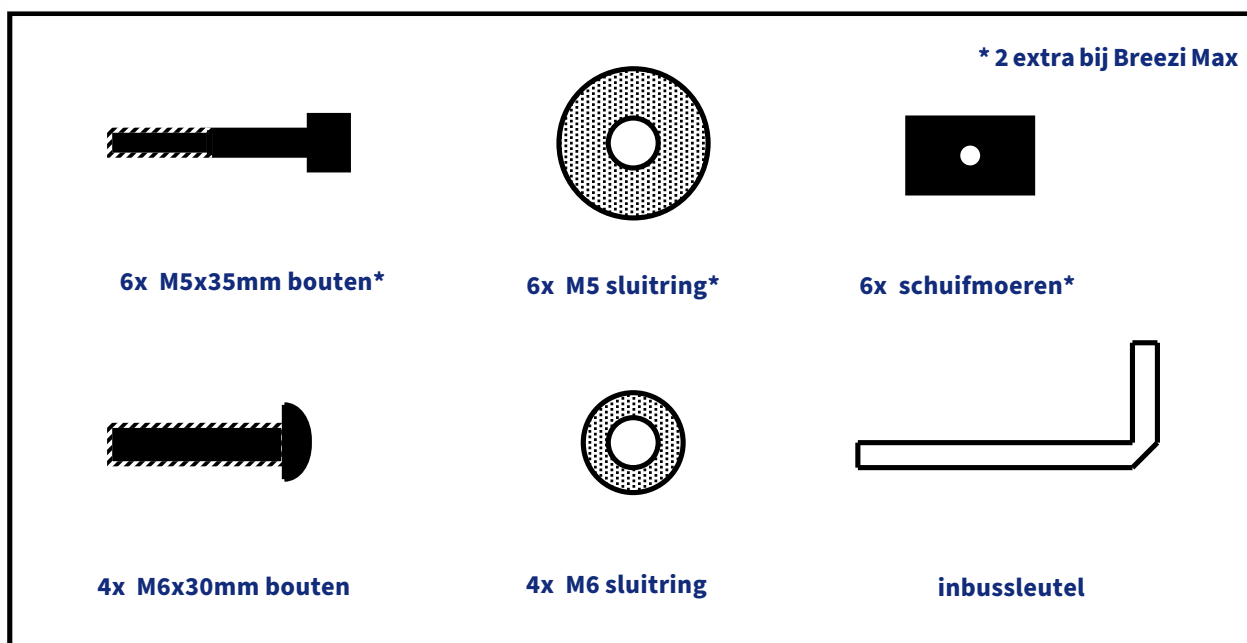


De verbindingbalken, rugleuningen en twee verbindingstangen zijn verpakt met de bevestigingsmaterialen al bevestigd. Verwijder de twee 35 mm bouten van de basisrail en laat de schuifmoeren in de rail zitten. Monteer een uiteinde van de rail op een Beezi-poot door de gaten in het zijframe op één lijn te brengen met de twee deuvels die uit de verbindingbalk steken. Zorg ervoor dat de afgeronde hoeken van de verbindingbalk zich bovenaan bevinden, zoals afgebeeld:

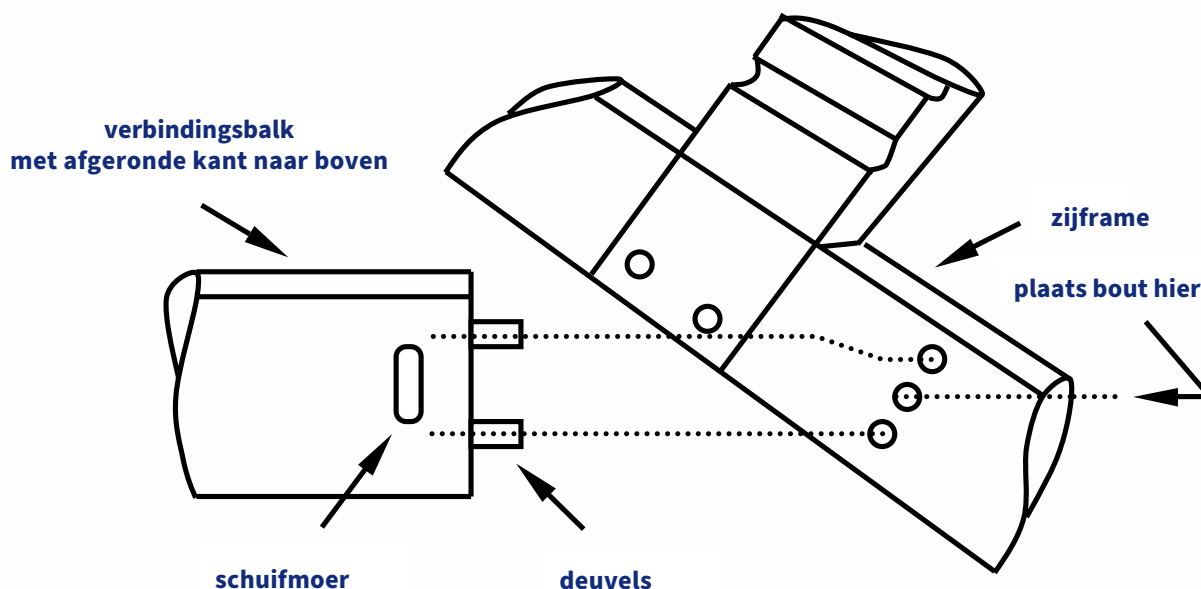

Zorg ervoor dat de verbindingbalk stevig aan de poot is bevestigd en plaats de 35 mm bout en sluitring door het gat vanaf de zijkant van het zijframe, zoals hierboven weergegeven. Doe hetzelfde met het andere zijframe aan het andere uiteinde van de verbindingbalk. Pas op dat u de bouten niet te strak aandraait. Gebruik geen elektrisch gereedschap! Gebruik de meegeleverde inbussleutel.

Verwijder nu de bouten van de rugdelen, houd de schuifmoeren op hun plaats en steek beide rails in de groeven in de bovenkant van de zijdelen (misschien wilt u de stoel ondersteboven op een bank leggen om de schuifmoeren op hun plaats te houden). Bevestig de bouten en ringen door de zijframes in de rugdelen, waarbij u ervoor zorgt dat de rugdelen stevig in de groeven worden geduwd. Bij het aandraaien van de bouten in de schuifmoeren van de rugdelen is het aan te raden de schuifmoer met een duim of vinger in positie te houden. Dit om beschadiging aan het rugdeel te voorkomen.

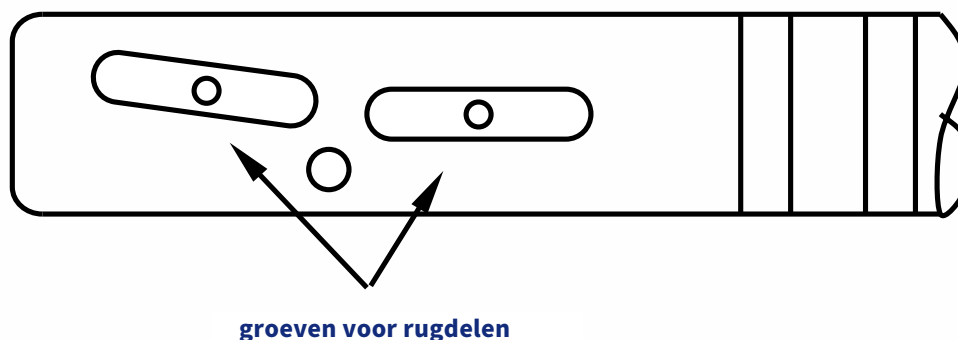

Monteer nu de zwarte verbindingstangen, waarbij u de 30 mm bouten en ringen door de twee resterende gaten aan weerszijden van de stoel steekt. Draai voorlopig alleen de bovenste bouten vast. Schuif de zitting en de voetplaat met de afgeronde kant naar achteren, in de sleuven op de stoel. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor hulp bij het positioneren van zitting en voetplaat. Draai ten slotte de laatste bouten vast van de verbindingstangen, om de platen op hun plaats te houden.

