

zitje



U heeft een Zitje gekocht! Goede keus!

Zitjes kunnen eenvoudig met het bijgeleverde klittenvilt gemonteerd worden op alle vlakke oppervlakken, waaronder diverse merken meegroeistoelen (bijv. Breezi, Tripptrapp, Treppy, etc.).

MONTAGE

1. Reinig/ontvet het oppervlak waarop het klittenvilt geplakt wordt.
2. Plak het klittenvilt op de juiste breedte op de zitting en knip de overtollige lengte af. Tip: Monteer het klittenvilt aan het klittenband onder aan het zitje. Haal de beschermlaag eraf en plaats het Zitje in de gewenste positie. Druk het Zitje goed aan en trek daarna het Zitje van het klittenvilt. Wrijf het klittenvilt goed aan. Het is nu klaar om het Zitje op te plaatsen.
3. Plaats het zitje met de beensteunen aan de voorzijde. (Bij Zitje Stabiel de hoge zijde aan de voorkant)

INSTELLING

1. Stel (indien mogelijk) de juiste Zitdiepte in.
2. Stel de juiste zithoogte in. Mocht de stoel zonder Zitje al goed ingesteld zijn: monteer de zitting 1 positie lager om de dikte van het Zitje te compenseren.
3. Stel de breedte van de beensteunen in. Aan de voorzijde van het Zitje zitten twee openingen in de bekleding. Hieronder zit een inbusbout maat 4mm (maat Breezi, Tripptrapp, Ikea). Voor elke beensteun één. Draai deze bouten 1 slag los en stel de beensteunen op de juiste breedte in. Draai daarna de bouten weer vast.

MONTAGE VAN DE 4-PUNTS BEKKENBAND

1. Aan elk Zitje zitten 4 gespjes om een bekkenband te monteren
2. Schuif de passantjes / gespjes op de riempjes en schuif ze door tot vlak bij de polstering.
3. Haal eerst de twee achterste riempjes door de gespjes op de hoeken aan de achterzijde van het Zitje. Stel de lengte in en maak ze vast met de zojuist erop geschoven gespjes / passantjes.
4. Monteer de twee andere riempjes (die met een oogje aan de bekkenband zitten) op dezelfde wijze aan de voorste gespjes.
5. U kunt eventueel overtollig materiaal van de riempjes afknippen en de rafels dicht schroeien / smelten. Let op! Hou ten minste 10cm marge aan om eventuele groei van het kind op te kunnen vangen.
6. De lengte van de bekkenband is behalve met de gespjes / passantjes ook met de sluiting in te stellen. De sluiting is met bekleding afgedekt, zodat het niet de aandacht van het kind trekt. Door de bekleding aan de zijanten in te drukken is de sluiting te ontgrendelen. Deze sluiting in combinatie met klittenband biedt in de meeste gevallen voldoende stevigheid en veiligheid.

Mocht ondanks deze handleiding problemen ervaren bij de installatie van uw Zitje: neemt u dan gerust contact met ons op: info@revakidz.nl of bel naar 085-4865024